



ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE ZOBOZDRAVNIŠKEGA STOLA

Št. dokumenta/koda:	UČE NP 16.06
Stran od strani:	1/4
Velja od:	21. 7. 2022
Uporaba najmanj do:	21. 7. 2027
Izdaja:	Verzija 1

1. Namen in cilji aktivnosti

S čiščenjem in razkuževanjem zobozdravniškega stola in neposredne okolice zmanjšamo tveganje za prenos okužbe.


Ključne besede: čiščenje, razkuževanje, zobozdravniški stol, aerosol, osebna varovalna oprema

2. Aktivnost ZBN lahko izvede (skladno s kompetencami)

IZBN		Omejitve, pripombe
Bolničar negovalec	NE	
Tehnik zdravstvene nege	DA	Tehnik zdravstvene nege – zobozdravstveni asistent Tehnik zdravstvene nege z NPK zobozdravstveni asistent Tehnik zdravstvene nege s specialnimi znanji
Diplomirana medicinska sestra	DA	dipl. m. s. s specialnimi znanji
Diplomirana babica	NE	
Diplomirana medicinska sestra, 38. člen ZZDej-K	DA	licenca za strokovno področje
Študent zdravstvene nege	DA	Pod nadzorom mentorja
Študent babiške nega	NE	

Predviden čas za izvedbo aktivnosti	5 minut
--	---------

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti	Ena (1)
--	---------


Skrbnik NP		Sekcija MS in ZT v zobozdravstvu
-------------------	---	----------------------------------

3. Kratice uporabljene v protokolu

Dipl. m. s./ dipl. zdrav.	Diplomirana medicinska sestra/ diplomirani zdravstvenik		
TZN	Tehnik zdravstvene nege		
BN	Bolničar negovalec		
IZBN	Izvajalec zdravstvene / babiške nege		
ZBN	Zdravstvena/babiška nega		
NP	Nacionalni protokol		

4. Potrebni pripomočki

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> osebna varovalna oprema (zaščitne rokavice, zaščitna maska), namenske krpice, čistilno razkužilno sredstvo za zobozdravniški stol, po priporočilu proizvajalca | <ul style="list-style-type: none"> posoda za razkuževanje sesalnih sistemov, čistilno razkužilno sredstvo za sesalne sisteme, po priporočilu proizvajalca namenski filtri za zobozdravniški stol. |
|--|--|

 <p>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babič in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana Tel: 01 544 54 80 e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si</p>	<p>NACIONALNI PROTOKOL AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE</p> <p>ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE ZOBOZDRAVNIŠKEGA STOLA</p>	Št. dokumenta/koda:	UČE NP 16.06
		Stran od strani:	2/4
		Velja od:	21. 7. 2022
		Uporaba najmanj do:	21. 7. 2027
		Izdaja:	Verzija 1


5. Potek/izvedba aktivnosti zdravstvene nege

		Opombe
1	Izpraznimo zobozdravniški stol in neposredno okolico.	
2	Popršimo čistilno razkužilno sredstvo (v peni) v pljuvalnik in ga pustimo učinkovati predpisan čas.	Čistilno razkužilno sredstvo pustimo učinkovati po navodilu proizvajalca.
3	<p>1. sklop; s čiščenjem in razkuževanjem začnemo na zobozdravniškem elementu. Najprej očistimo pregledovalnik intraoralnih rentgenskih slik in upravljalno ploščo, nadaljujemo z odlagalnimi površinami, cevmi in priključki nasadnih instrumentov, polimerizacijsko lučko, ultrazvočnim instrumentom in končamo z zračno-vodno pršilko.</p> <p>2. sklop; očistimo naslonjalo za glavo, naslonjalo za hrbet in naslonjala za roke na zobozdravniškem stolu, nadaljujemo z ročaji in stikalom za vklop reflektorja, na koncu sklopa očistimo še reflektor.</p> <p>3. sklop; nadaljujemo z ročaji terapevtovega stola za nastavitev višine, ročaji asistentovega stola za nastavitev višine, ročaji predalnika za inštrumente, nadzorno ploščo na elementu za asistenco, nastavek sesalca za slino z vrhnjim delom cevi in nastavek aspiratorja z vrhnjim delom cevi. Na koncu očistimo in razkužimo podstavek za kozarec za izpiranje.</p>	<p>Zobozdravniški stol in neposredno okolico čistimo in razkužujemo po sklopih, po principu od manj k bolj kontaminiranem področju. Velike (vsaj 15 cm x 30 cm) namenske krpice menjamo, ko so vidno onesnažene ali suhe in med posameznim sklopom. Krpice med čiščenjem prepogibamo, s tem omogočamo štiri čiste površine.</p> <p>V primeru da element za asistenco vsebuje zračno-vodno pršilko in/ali odlagalno površino, ju z dodatno krpo očistimo.</p>
4	Pljuvalnik speremo s tekočo vodo in mehansko očistimo z namensko krpico.	
5	Po končanem delu očistimo tudi ostale površine zobozdravniškega stola, ki niso zajete v sklopih in jih pred/med pacientom nismo čistili.	Podnožje zobozdravniškega stola, nožno stikalo...
6	Očistimo in razkužimo sesalni sistem in filtre.	Po končanem delu čistilno razkužilno sredstvo za sesalne sisteme spustimo skozi sesalni sistem. Filtre nadomestimo s čistimi.

6. Opombe, omejitve protokola: /

7. Temeljna literatura:

Jakubovics, N., Greenwood, M., Meechan. J.G. (2014). General medicine and surgery for dental practitioners: part 4. Infections and infection control. *British Dental Journal*, 217(2), 73-7.

 <p>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babič in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana Tel: 01 544 54 80 e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si</p>	<p>NACIONALNI PROTOKOL AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE</p> <p>ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE ZOBOZDRAVNIŠKEGA STOLA</p>		Št. dokumenta/koda:	UČE NP 16.06
			Stran od strani:	3/4
			Velja od:	21. 7. 2022
			Uporaba najmanj do:	21. 7. 2027
			Izdaja:	Verzija 1

- Ricci, M.L., Fontana, S., Pinci, F., Fiumana, E., Pedna, M.F., Farolfi, P., Sabattini, M.A., Scaturro, M. (2012). Pneumonia associated with a dental unit waterline. *Lancet*, 18;379(9816), 684.
- Hatzenbuehler, L.A., Tobin-D'Angelo, M., Drenzek, C., Peralta, G., Cranmer, L.C., Anderson, E.J., Milla, S.S., Abramowicz, S., Yi, J., Hilinski, J., Rajan, R., Whitley, M.K., Gower, V., Berkowitz, F., Shapiro, C.A., Williams, J.K., Harmon, P., Shane, A.L. (2017). Pediatric Dental Clinic-Associated Outbreak of Mycobacterium abscessus Infection. *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*; 1;6(3), e116-e122.
- Peralta, G., Tobin-D'Angelo, M., Parham, A., Edison, L., Lorentzson, L., Smith, C., Drenzek, C. (2016). Notes from the Field: Mycobacterium abscessus Infections Among Patients of a Pediatric Dentistry Practice-Georgia. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 8;65(13), 355-6.
- Kohn, W.G., Harte, J.A., Malvitz, D.M., Collins, A.S., Cleveland, J.L., Eklund, K.J. (2003). Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for infection control in dental health care settings. *The Journal of the American Dental Association*; 135(1), 33-47.
- Fidler, A. (2012). *Predklinični praktikum-instrumenti in naprave*. 9-15. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

8. Podrobnejša in dodatna navodila - povezava z drugimi dokumenti (priloge k NP)

Številka priloge	Naziv dokumenta

9. Pregled zadnjih sprememb v dokumentu

Zap. št.	Sprememba v točki:	OPIS SPREMEMBE

10. Potrditev dokumenta

	organ	Številka sklepa	datum	Odgovorna oseba/podpis
I. SKLEP O USTREZNOSTI NP	Delovna skupina za nacionalne protokole Zbornice-Zveze	9/2022	7. 6. 2022	Klavdija Potočnik
II. SKLEP O USTREZNOSTI NP	Upravni odbor Zbornice - Zveza	187/19	14. 7. 2022	Monika Ažman



Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester,
babič in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80
e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

NACIONALNI PROTOKOL AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE ZOBOZDRAVNIŠKEGA STOLA

Št. dokumenta/koda:	UČE NP 16.06
Stran od strani:	4/4
Velja od:	21. 7. 2022
Uporaba najmanj do:	21. 7. 2027
Izdaja:	Verzija 1

	FUNKCIJA/ ORGAN	IME IN PRIIMEK	PODPIS
PRIPRAVIL:	Strokovnjaki Strokovne sekcije MS in ZT	Valerija Skopec	
PREGLEDALI:	Strokovne službe Zbornice – Zveze / PVK	Draga Štromajer	
ODOBRIL:	Predsednica Zbornice – Zveze	Monika Ažman	
SKRBNIK DOKUMENTA:	Predsednik/ca Strokovna sekcija MS in ZT	Damjana Grubar	

Distribucija dokumenta: interna uporaba

objava na spletni strani

mapa strokovne sekcije

drugo: _____

Klas. znak 711

Original dokumenta se nahaja v IS. Vse natisnjene kopije se smatrajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb.